

Rx ONLY




Caution: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner



Consult Instructions for Use

Chirurgie Laryngée / Laryngeal Surgery / Chirurgia laringea / Kehlkopfchirurgie / Cirugía laríngea / Larynxchirurgie / Larynx operation / Laryngeaalikirurgia / Larynxkirurgi / Cirurgia da laringe / Λαρυγγική χειρουργική/επέμβαση / Chirurgia krtani / Chirurgie hrtanu / Gégemútét / Laringeal cerrahi / Larynxkirurgi

MCL55 Pistolet / Injection pistol / Iniettore a pistola / Injektionspistole / Pistola de inyección / Injექtiepistol / Injektionspistol / Injektiopistooli / Injektionspistol / Pistola de injeção / Πιστόλι έγχυσης / Wstrzykiwacz / Injekční pistole / Befecskendezőpisztoly / Enjeksiyon pistolü / Injeksjonspistol


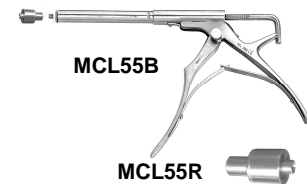
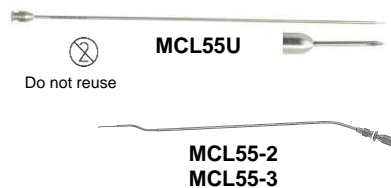
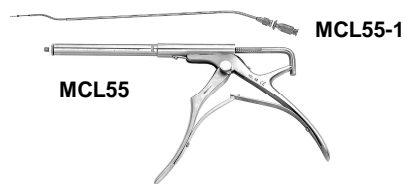


Nettoyage / Cleaning / Pulizia / Reinigen / Limpieza / Reiniging / Rengøring / Puhdistus / Rengöring / Limpeza / Καθαρισμός / Czystczenie / Čištění / Tisztítás / Temizleme / Rengjøring /






Clé de serrage / Locking key / Chiave di serraggio / Arretierungsschlüssel / Llave de bloqueo / Vergrendelings sleutel / Låsenøgle / Lukitusavain / Låsskruv / Chave de fixação / Κλειδί ασφάλισης / Klucz unieruchamiający / Blokovací klíč / Zárókulcs / Kilitleme anahtarı / Låsenøkkel

Montage / Assembly / Montaggio / Baugruppe / Montaje / Set / Samling / Kokoonpano / Montering / Montagem / Συσκευασία / Montaż / Složení / Egység / Takma / Montering

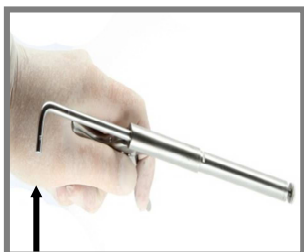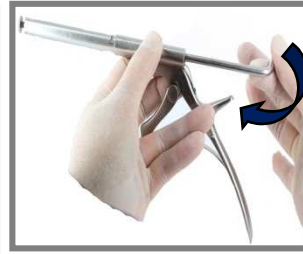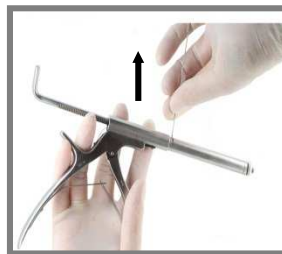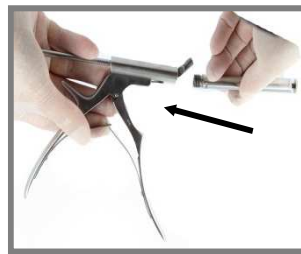

Démontage / Disassembly / Smontaggio / Abnehmen / Desmontaje / Demontieren / Afmonter / Pura / Demontera / Desmontagem / Αποσυναρμολόγηση / Demontaž / Rozebrání / Szétszerel / Sökme / Demontering

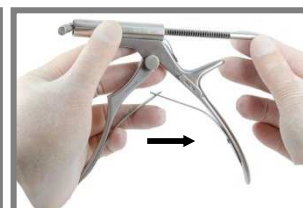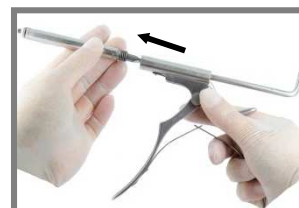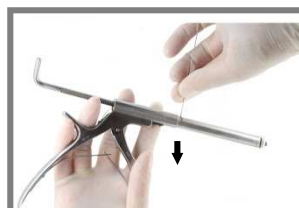

Rx ONLY

Caution: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner



Consult Instructions for Use


Chirurgie Laryngée / Laryngeal Surgery / Chirurgia laringea / Kehlkopfchirurgie / Cirugía laríngea / Larynxchirurgie / Larynx operation / Laryngeaalikirurgia / Larynxkirurgi / Cirurgia da laringe / Λαρυγγική χειρουργική/επέμβαση / Chirurgia krtani / Chirurgie hrtanu / Gégemútét / Laringeal cerrahi / Larynxkirurgi

MCL55 Pistolet / Injection pistol / Iniettore a pistola / Injektionspistole / Pistola de inyección / Injectiepistool / Injektionspistol / Injektionipistooli / Injektionspistol / Pistola de injeção / Πιστόλι έγχυσης / Wstrzykiwacz / Injekční pistole / Befecskendezőpisztoly / Enjeksiyon pistolü / Injeksjonspistol

MCL55 + MCL55-1 : Montage / Assembly / Montaggio / Baugruppe / Montaje / Set / Samling / Kokoonpano / Montering / Montagem / Συσκευασία / Montaż / Složení / Egység / Takma / Montering



Pour remplir le pistolet / To fill up the injection pistol / Riempimento dell'iniettore a pistola / Zum Füllen der Injektionspistole / Para llenar la pistola de inyección / Het injectiepistool vullen / Sådan fyldes injektionspistolen / Injektionipistoolin täyttäminen / Så här fyller du på injektionspistolen / Para encher a pistola de injeção / Για πλήρωση του πιστολιού έγχυσης / Aby napełnić wstrzykiwacz / Postup naplnění injekční pistole / A befecskendezőpisztoly feltöltése / Enjeksiyon pistolünü doldurmak için / Fylle injeksjonspistolen

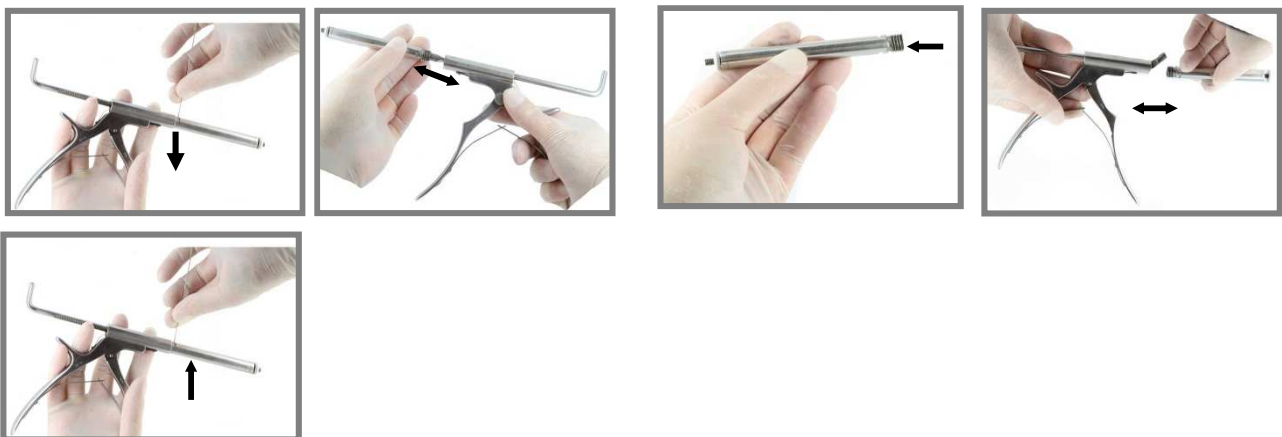

MCL55B - Montage / Assembling / Montaggio / Baugruppe / Montaje / Set / Samling / Kokoonpano / Montering / Montagem / Συσκευασία / Montaż / Složení / Egység / Takma / Montering

